


COME UTILIZZARE

HOW TO USE

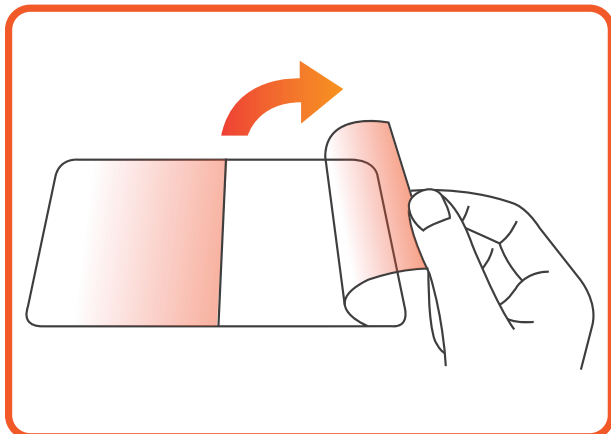

1


Controllare che la propria pelle sia secca e non sudata prima dell'uso. Estrarre il cerotto dalla plastica protettiva e rimuovere il film protettivo.

Check that your skin is dry and not sweaty before use. Take the patch out of the protective plastic and remove the protective film.

2

Applicare il prodotto sull'area dolorante e far aderire il cerotto alla pelle in modo da fissarlo correttamente.


Apply the product to the painful area and make the patch adhere to the skin in order to fix it correctly.

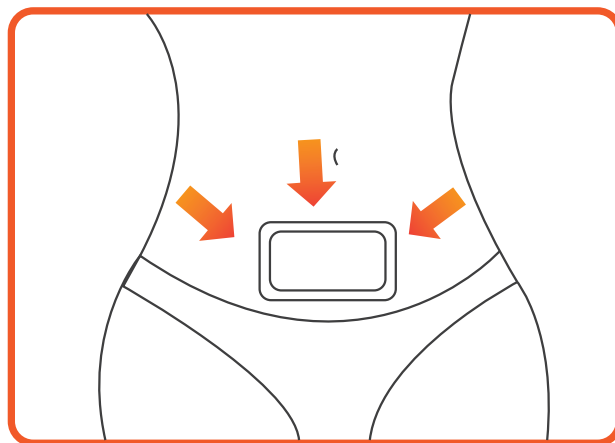

3

Il cerotto agisce con una temperatura costante tra i 39° e 42° per circa 8 ore.

The patch works at a constant temperature between 39 ° and 42 ° for about 8 hours.

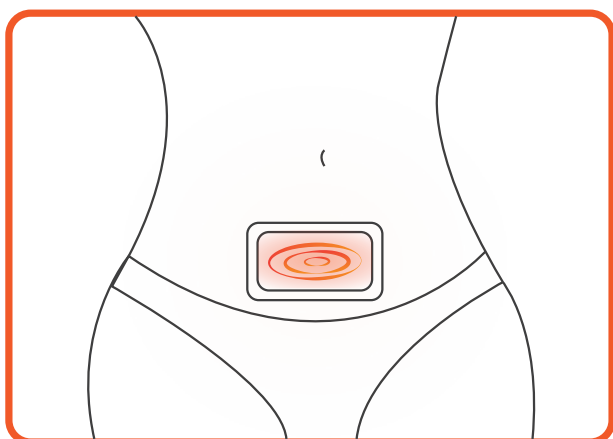

Evitare di usare il prodotto durante il sonno, questo potrebbe causare bruciature da bassa temperatura. Prestare maggiore attenzione durante l'utilizzo del prodotto in caso di pelle sensibile. Non bagnare, non tagliare o strappare il cerotto. In caso rottura del cerotto evitare il contatto con gli occhi, nel caso sciacquare con acqua corrente e consultare un medico, non inserire nel microonde.

Teradol non contiene farmaci. Istruzioni per l'uso, avvertenze, controindicazioni ed effetti indesiderati.

Leggere il foglio illustrativo interno.

TERADOL è un dispositivo medico CE 0476.

Avoid using the product while sleeping, this could cause low temperature burns.

Pay more attention when using the product in case of sensitive skin. Do not wet, cut or tear the patch.

In case of breakage of the patch avoid contact with eyes, in case rinse with running water and consult a doctor, do not put in the microwave.

Teradol does not contain drugs. Instructions for use, warnings, contraindications and side effects.

Read the inside leaflet.

TERADOL is a medical device CE 0476.